

Návod na použitie zdravotníckej pomôcky

ALIAMARE®

IZOTONICKÝ SPREJ, ROZTOK MORSKEJ VODY A SODNEJ SOLI KYSELINY HYALURÓNOVEJ na dennú hygienu nosa a uší dospelých a detí.

ČO JE ALIAMARE®?

Aliamare® kombinuje priaznivé skvapalňovacie vlastnosti morskej vody zo súostrovia Bréhat, prírodnej lokality v Bretónsku, klasifikovanej ako Nature 2000 (Príroda 2000), s kyselinou hyalurónovou, dobre známou pre svoju schopnosť priťahovať a udržiavať vodu. Dokáže hydratovať sliznice a pomáhať hojiť akékoľvek mikroskopické poškodenie. Morská voda je zriedená, aby sa vytvorila izotonická koncentrácia, čo zároveň spôsobuje, že zdravotnícka pomôcka Aliamare® je neдрáždivá.

ZLOŽENIE:

Každá 100 ml (50 ml) nádobka spreja obsahuje: morskú vodu, sodnú soľ kyseliny hyalurónovej.

INDIKÁCIE:

Nos: Pomáha odstraňovať nadmernú sekréciu, poskytuje rýchlu úľavu pre suché sliznice, je prospešný po operáciách nosa.

Uši: Bráni vzniku zátok ušného mazu, pomáha udržiavať ušný kanál v čistote pre osoby používajúce pomôcky pre nepočujúcich.

FREKVENCIA POUŽÍVANIA: Používajte viackrát denne, podľa potreby. Produkt umožňuje až 400 (200) aplikácií.

POPIS PRODUKTU:

1 nádobka spreja pod tlakom obsahujúca 100 ml (50 ml) roztoku + 1 tryska spreja na nosné použitie a 1 tryska spreja na ušné použitie, zabalené v uzavretých vreckách.



V tomto druhu balenia je roztok obsiahnutý vo vrecku vyrobenom z netoxického materiálu vloženom v kovovej nádobke, úplne izolovanom od pohonnej látky spreja (stlačeného plynu). Použitou pohonnou látkou je vzduch, ktorý je pod tlakom vo všetkých priestoroch obklopujúcich vrecko vo vnútri kovovej nádobky. Produkt sa dávkuje ventilom na vrchu vrecka.

Vďaka svojmu návrhu:

- je tu ako plynná pohonná látka použitý vzduch, preto tento produkt **NEPOŠKODZUJE OZÓNOVÚ VRSTVU**
- nie je potrebné používať konzervačné látky, preto je tu **NIŽŠIA** pravdepodobnosť **ALERGICKÝCH REAKCIÍ**
- sprej sa môže použiť v akejkoľvek polohe: preto je tento produkt **PRAKTICKÝ A JEDNODUCHO SA POUŽÍVA**

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Odstráňte uzatvárajúci vrchnák a nasadte príslušnú hlavicu na ventil: na nosové použitie zvolte dávkovač zobrazený na Fig. A, na ušné použitie zvolte dávkovač zobrazený na Fig. B.

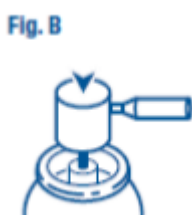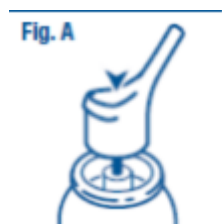

2. Stlačte trysku spreja, aby sa produkt rozprášil.
3. Po použití trysku spreja očistite a potom osušte.

Nos: Produkt sa môže použiť v akejkolvek polohe: Odporúča sa však, aby ste naklonili hlavu na jednu stranu a roztok 2 sekundy striekali do nosnej dierky na opačnej strane (napr. hlavu nakloňte doprava a roztok nastriekajte do ľavej nosnej dierky). Zopakujte do každej nosovej dierky.

Uši: Produkt sa môže použiť v akejkolvek polohe: Odporúča sa však, aby ste naklonili hlavu na jednu stranu nad premývaciu vaničku a streknite raz alebo dva razy do ucha bližšieho k vaničke. Pár sekúnd počkajte a potom zľahka poklepkaním osušte.

UPOZORNENIA

Nepoužívajte u malých detí, ak to nenariadil detský lekár.

Pozor: Nádobka spreja je pod tlakom; pri zahriatí môže vybuchnúť.

Chráňte pred slnečným svetlom a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C.

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, horúcich plôch, iskier, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.

Nádobku spreja neprepichujte, ani nespáľujte, a to ani po jeho použití.

Nefajčite.

Neprehĺtajte.

Zabráňte postriekaniu očí.

Nepoužívajte Aliamare® po dátume expirácie uvedenom na štítku.

Aliamare® nepoužívajte, ak je nádobka spreja poškodená.

Po použití nádobku spreja zlikvidujte v súlade s požiadavkami na bežný separovaný odpad.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOHLADU A DOSAHU DETÍ

INTERAKCIE: V súčasnosti neboli hlásené medzi zdravotníckou pomôckou Aliamare® a inými liekmi žiadne interakcie.

KONTRAINDIKÁCIE A NEŽIADUCE ÚČINKY: Aliamare® je kontraindikovaný u pacientov s otoreou (výtok z ucha pri zápale) v anamnéze, perforáciou membrány bubienka alebo chronickou infekciou stredného ucha. Neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky vyplývajúce z použitia zdravotníckej pomôcky ALIAMARE®.

Čas použiteľnosti: 36 mesiacov

Dátum expirácie označuje maximálny čas použiteľnosti zdravotníckej pomôcky.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie ZP: November 2019

Rok CE certifikácie: 2010

Obchodné meno výrobcu:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl.

Via Martiri di Cefalonia 2, 269 00 Lodi (LO), Taliansko

E-mail: info@ibsa.it

Distribútor:

IBSA Slovakia s.r.o.


Mýtna 42, 811 07 Bratislava, Slovenská republika



Chráňte pred slnečným svetlom



Pozor: pozorne si prečítajte upozornenia

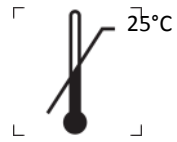

Horný teplotný limit



Šarža



Použite do



Nepoužívajte ak je balenie poškodené